




EUGYN[®] GEL

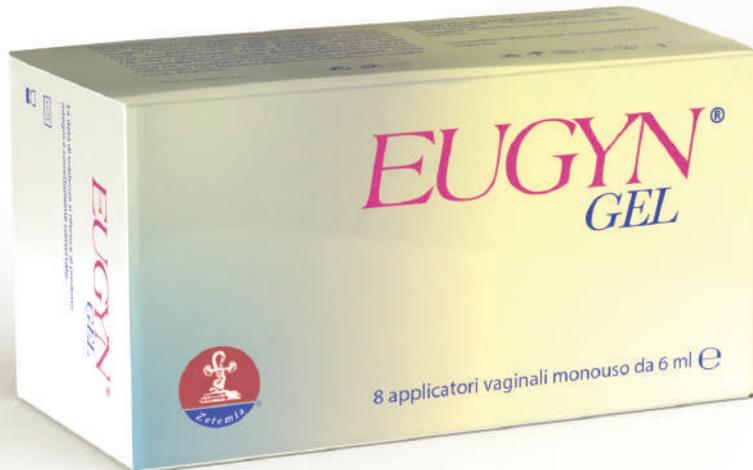

Composizione

Acqua Purificata, Ttrisodium Ethylenediamine Disuccinate, Glycerin, Pentylene Glycol, Fitosoma Gentella Asiatica, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Hydroxyethylcellulose, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Oil, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Borago Officinalis Seed Oil, Chamomilla Recutita Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, Salvia Officinalis Oil, Mentha Piperita Oil, Hydroxyacetophenone, Arginine.

Categoria Terapeutica

Dispositivo Medico per somministrazione vaginale.

Indicazioni

Gel mucoadesivo utile nella protezione e nella idratazione dell'epitelio vaginale migliorandone la lubrificazione, l'elasticità ed il trofismo. Eugyn gel è indicato per contrastare l'insorgenza della secchezza vaginale di qualsiasi genere, in menopausa e quella associata alla sindrome genitourinaria (GSM)

Posologia

Una applicazione alla sera per otto giorni. Poi due applicazioni settimanali per quattro settimane o secondo prescrizione medica.

Istruzioni d'uso

- 1) rimuovere il sigillo dall'applicatore monouso;
- 2) in posizione distesa a ginocchia sollevate ed allargate introdurre profondamente l'applicatore in vagina e premere energicamente fino alla completa fuoriuscita del gel, quindi estrarre l'applicatore.

Controindicazioni ed interazioni

Ipersensibilità accertata verso uno dei componenti. Nessuna interazione nota con altri medicinali o altre forme di interazione farmacologica. In caso di gravidanza in corso o programmata consultare il ginecologo e mostrargli il foglio illustrativo prima di iniziare il trattamento.

Avvertenze

Gli applicatori sono monouso, non riutilizzare per evitare il rischio di infezioni. Non usare su pazienti sotto i 12 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. Non contiene ormoni.

Conservazione

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C in luogo asciutto e al riparo dalla luce. Non refrigerare. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Contenuto della confezione

8 applicatori vaginali monouso da 6 ml